

# DC Hygiene Tücher AF Lemon Fresh



- ▶ **gebrauchsfertige Tücher**
- ▶ **aldehyd- und phenolfrei**
- ▶ **fungizid (Candida albicans)**
- ▶ **viruzid**
- ▶ **bakterizid (inkl. Tbc, MRSA und Mycobacterium terrae)**
- ▶ **rückstandsfreie Abtrocknung**

## Präparattyp

DC Hygiene Tücher AF Lemon Fresh sind ein Desinfektionsmittel zur Reinigung von kleinen Flächen, Geräten, Hand- und Winkelstücken usw.

Die Hygienetücher sind getränkt mit DC Sprühdeseinfektion AF Lemon Fresh, welches auf Ethanol- und QUATS-Basis im Sinne des MPG (Medizinproduktgesetzes), wirkt.

DC Hygiene Tücher AF Lemon Fresh zeichnen sich aus durch einen frischen Duft und eine gute Hautverträglichkeit, die der aldehydfreien Zusammensetzung zuzusprechen ist.

Vorteile sind eine breite mikrobiologische Wirksamkeit gegenüber Bakterien (incl. TBC), Pilzen, Viren (HBV/HIV) + HCV, eine gute Materialverträglichkeit und eine schnelle und rückstandsfreie Abtrocknung.

DC Hygiene Tücher AF Lemon Fresh erfüllen die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem. TRGS 525/540.

## Anwendungsgebiete

DC Hygiene Tücher AF Lemon Fresh sind als Flächendesinfektionsmittel in Bereichen, in denen Schnelldesinfektion gebraucht wird, geeignet:

- ▶ **Arzt- und Zahnarztpraxen**
- ▶ **Schnelldesinfektion von OP-Inventar und –Tischen zwischen Operationen.**
- ▶ **Bettgestelle, Matratzen, Decken und Kissen**
- ▶ **Badewannen und Toilettensitze**
- ▶ **Bekleidung wie Kittel, OP-Schuhe, Gummischürze...**

**Nicht anzuwenden auf alkoholempfindlichen Flächen, wie Acrylglas.**

## Art der Anwendung

Den Inhalt der Nachfüllpackung direkt in die Spenderdose füllen, aus der Rollenmitte ziehen Sie das erste Tuch durch die Öffnung des Spenderdosendeckels und verschließen anschließend die Dose.

Gegenstände, Oberflächen und Teile gut abwischen, desinfizierte Flächen, Gegenstände und Teile erst wieder nach der vorgegebenen Einwirkzeit benutzen.

### Hinweis:

**Nicht auf alkoholempfindlichen Flächen anwenden, z.B. Acrylat, Kunststoff „Plexiglas“.**

# DC Hygiene Tücher AF Lemon Fresh

## Mikrobiologie

DC Hygiene Tücher AF Lemon Fresh wirken gegen:

- ▶ Bakterien (inkl. Tbc, MRSA und Mycobacterium terrae)
- ▶ Pilze (Candida albicans)
- ▶ Viren (HBV/HIV und HCV)

## Anwendungskonzentration / Einwirkzeit

<b>Einwirkzeit nach VAH</b>	<b>5 Minuten</b>
<b>Einwirkzeit nach Gutachten:</b>	
Hospitalismusprophylaxe	30 Sekunden
Tbc und Mycobacterium terrae	1 Minute
Hepatitis C	30 Sekunden
HBV-viruzid (HIV) ohne Eiweißbelastung	1 Minute
HBV-viruzid (HIV) mit Eiweißbelastung	3 Minuten

## Produktzusammensetzung

in der Tränklösung sind enthalten:

Ethanol  
2-Propanol  
N,N-Didecylid-N,N-dimethylammoniumchlorid  
Geruchsstoffe, pH-Regulatoren

## Chemisch-Physikalische Zusammensetzung

pH-Wert: ca. 5,0  
Dichte (20 °C): 0,900 - 0920

## Kennzeichnung gem. EG-Richtlinien / GeStoffV

R 10 entzündlich  
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen  
S 7 Behälter dicht geschlossen halten  
S 16 Von Zündquellen fern halten - Nicht rauchen  
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

## Besonderer Hinweis

**Vor Gebrauch immer die Präparateinformationen und das Sicherheitsdatenblatt lesen.**

## Lieferformen / VE

Spenderdose	018045	Maß 140x170mm
Nachfüllbeutel	018046	Maß 140x170mm
Spenderdose	018048	Maß 200x270mm
Nachfüllbeutel	018049	Maß 200x270mm

## Lagerbedingungen

Nach dem Öffnen der Hygiene-Tücher Nachfüllbeutel, die Tücher in einem wieder verschließbaren Behälter aufbewahren, z.B. in einer Dose, um das Austrocknen zu verhindern.

## Kennzeichnung

CE 0482

Stand: 26.02.09