



**Großhandelsgesellschaft
mbH**

Carl-Zeiss-Str. 2
22946 Trittau
Tel.: 04154 / 8437 - 0
Fax: 04154 / 8437 - 33

DC Dental Central GmbH, Carl-Zeiss-Str. 2, D-22946 Trittau

Produktbeschreibung
Produkt: DC Prothesen-Finish
Art.-Nr: 714543/

DC Prothesen-Finish dient zum Entfernen von Monomerresten auf prothetischen Arbeiten. Es wertet alle Arbeiten auf und verleiht dem Objekt einen angenehmen frischen Geschmack. Durch die bekömmlichen Geschmackstoffe wird dem Patienten von Beginn an ein angenehmes Tragegefühl vermittelt und der Speichelfluss zur verstärkten Anhaftung bei Prothesen erhöht. Die Arbeiten werden zusätzlich durch einen zurückgeliebenden Hochglanz veredelt.

Zusätzlich ist DC Prothesen-Finish dermatologisch getestet. Nach Endbehandlung von prothetischen Arbeiten mit DC Prothesen-Finish kann der Zahnersatz oder auch KFO - Platten direkt dem Patienten eingesetzt werden.

Anwendung: Aus einer Entfernung von 4-5cm die Flächen einsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem weichen Tuch abwischen oder aufpolieren. Eventuell Vorgang wiederholen.

Ein genaues Applikationsröhrchen dient zum gezielten Aufbringen. DC Prothesen-Finish ist ein FCKW – freies Medizinprodukt der Klasse I, abgefüllt mit für Pharmazeutika zugelassenem Treibgas.