



- Umweltfreundlich
- enthält hochwertige synthetische Öle
- Zur Pflege von Hand- & Winkelstücken, Köpfen und Turbinen, sowie Luftmotoren

DC Universal-Ölspray dient zur Instrumentenpflege, Schmierung und Reinigung der Turbinen und sorgt für eine sehr lange Lebensdauer.

DC Universal-Ölspray enthält ausschließlich hochwertige synthetische Öle mit speziell für Dentalbohrantriebe geeigneten Additiven.

DC Universal-Ölspray beinhaltet Antioxidantien, Verschleißschutzadditive, Korrosions- und Schauminhibitoren.

Anwendungsgebiete:

Zur Pflege von Hand- & Winkelstücken, Köpfen und Turbinen, sowie Luftmotoren.

Art der Anwendung:

Vor jedem Sterilisationsdurchgang ca. 2 Sekunden durchsprühen. Dose vor Gebrauch senkrecht halten und mit passendem Adapter verwenden.

Produktzusammensetzung:

- n-Butan/iso-Butan
- Propan

Chemisch-Physikalische Daten:

Zustandsänderung:	ausgesprühte Treibgasmenge wird sofort gasförmig
Siedepunkt/-bereich:	ab -42°C (Propan)
Flammpunkt:	-41°C (Propan)
Explosionsgrenzen:	untere: 1,4 Vol. % obere: 9,5 Vol. % (Propan/Butan)
Dichte:	ca. 0,654 g/cm ³ bei 20°C

DC Universal-Ölspray

Kennzeichnung gem. EG-Richtlinien / GefStoffV:

- S 9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren
- S 33 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen
- S 51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
- S 60 Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.



Besonderer Hinweis:

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Aerosol nicht einatmen.

Lieferformen:

Dose 500 ml

Regulatorische Grundlagen:

Medizinproduktegesetz (MPG)

- TRG 300 Technische Regeln Druckgase
- 93/42/EWG Medizinprodukte Richtlinien
- 75/324/EWG Richtlinie über Aerosolverpackungen
- 67/548/EWG Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe
- 1999/45/EG Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen
- EN 980 Symbole zur Kennzeichnung von Medizinprodukten

Lagerbedingungen:

- Lagerung bei Raumtemperatur in gut gelüfteten Räumen.
- Vor Temperaturen über 50°C und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Von Wärmequellen fernhalten.
- Nicht rauchen!
- Nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen! Nur völlig entleert wegwerfen!
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren!
- Lagervorschrift gem. TRG 300 beachten.

Kennzeichnung:

- CE
- UN-Nr. 1950

Stand: 2012-02