



Produktbeschreibung

Produkt : Adapter D für Pflege-Ölsprays
Art.Nr: 018098/

Der Adapter D ist ein universell einsetzbarer Adapter für die ISO-Schnittstelle und/oder die Winkelstückköpfe bei zahnärztlichen Handstücken. **(ISO 9168)**

Er wird zunächst auf den Sprühkopfstutzen (Kunststoff) der Aerosoldose aufgesteckt und mit dem vorderen Ende, an dem sich die Spitze befinden, in den Kopf des Handstücks eingeschoben oder auf den Lufteinlass der ISO-Schnittstelle aufgesteckt.

Es wird empfohlen ca. 3-4 Sekunden mit dem Öl durchzuspülen.